

SPRAY PROTEZIONE GOLA

# SPRAY GOLA

Dispositivo medico a base di Argento  
Colloidale SynthAg e Acqua salsobromoiodica



  
**SALUS  
THERMAE**  
MEDICAL DEVICE

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Lo Spray Gola Salus Thermae crea una barriera protettiva rivestendo la mucosa della cavità orale. La barriera intrappola i batteri e i virus del raffreddore, li blocca e impedisce loro di diffondersi e moltiplicarsi. La sinergia dell'argento colloidale SynthAg ed dell'acqua salsobromoiodica svolge inoltre un'azione decongestionante e lenitiva sul tessuto irritato o infiammato.

### DESTINAZIONE D'USO

Tratta e allevia il raffreddore, rigenera e protegge la mucosa orale.

### PRECAUZIONI

- Non usare Spray Gola Salus Thermae se si è ipersensibili/allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Gravidanza e allattamento: non vi sono dati relativi all'impiego del prodotto durante la gravidanza o l'allattamento.
- Non inalare quando si applica lo spray poichè può causare irritazione delle vie aeree, provocando tosse e raucedine.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, per evitare incidenti con le piccole parti.
- Consultare un medico se si ha la febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un normale raffreddore; potrebbero essere dovuti ad altre cause.
- Per evitare la diffusione di malattie, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona, previa accurata igiene delle mani.

### INDICAZIONE

Da usare in caso di esposizione a batteri, virus del raffreddore o alla comparsa dei primi sintomi del raffreddore e del mal di gola. Spray Gola Salus Thermae è adatto per adulti e bambini sopra i 4 anni.

### CONTROINDICAZIONI

Non sono note controindicazioni.

### POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti collaterali.

Se dovessero verificarsi effetti indesiderati durante l'uso di Spray Gola Salus Thermae, consultare un medico.

### BENEFICI CLINICI

- Spray Gola Salus Thermae protegge dai batteri e dai virus del raffreddore.
- Spray Gola Salus Thermae la durata del raffreddore se usato nella fase iniziale dell'infezione.
- Spray Gola Salus Thermae allevia i sintomi del raffreddore e calma il mal di gola.

## ISTRUZIONI PER L'USO


### QUANDO USARE

Iniziare ad utilizzare Spray Gola Salus Thermae appena possibile dopo la comparsa dei primi sintomi del raffreddore o dell'infiammazione alla gola o dopo la possibile esposizione ai virus e batteri. Continuare a usare Spray Gola Salus Thermae fino a quando i sintomi non saranno alleviati.

### COME USARE

1

Ruotare il beccuccio a sinistra o destra, senza manomettere l'erogatore. Aprire la bocca e puntare l'ugello verso la gola.

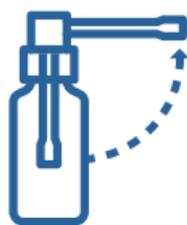

2

Premere verso il basso la testina dello spray e spruzzare 2 volte (1 dose) ogni 2 ore fino a 6 volte al giorno per tutto il tempo in cui si è esposti ai patogeni.



### COME FUNZIONA

Alla base di Spray Gola Salus Thermae c'è l'esclusivo Argento colloidale Synthag, che crea una barriera efficace contro agenti patogeni agendo in tre modi:

**Intrappola:** il Synthag crea una barriera transitoria osmoticamente attiva che intrappola i patogeni.

**Inibisce:** il Synthag ostacola la capacità dei patogeni di legarsi, impedendogli di infettare le cellule.

**Protegge:** la barriera creata da Spray Gola Salus Thermae protegge la cavità orale e la gola.

## INTRAPPOLA INATTIVA PROTEGGE

### LA CONFEZIONE SPRAY GOLA SALUS THERMAE CONTIENE

- Spray orale composto da flacone, testina dello spray, ugello e cappuccio protettivo.
- Spray Gola Salus Thermae contiene: Aqua (Deionized Water), Aqua (Thermal Water), Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Citric Acid, Menthol, Colloidal Silver.
- Istruzioni per l'uso (bugiardino).

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

- Conservare a temperatura pari o inferiore a 25°C.

### PRODOTTO DA:

SALUS CUTIS ITALIA SRL Via Cardano 32 - 43036 Fidenza (PR)