

SPRAY REFRESH MASK

SPRAY MASK

Dispositivo medico a base di Argento
Colloidale SynthAg e Acqua salsobromoiodica



SALUS
THERMAE
MEDICAL DEVICE

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spray Mask è un liquido per il trattamento di tessuti. La presenza dell'acqua ossigenata e del mentolo aiutano a igienizzare e rinfrescare la mascherina. Inoltre il complesso nanostrutturato a base di Synthag si dispone autonomamente ed uniformemente sulla superficie dei tessuti creando una barriera protettiva contro gli agenti patogeni.

DESTINAZIONE D'USO

USO ESTERNO, igienizzante di tessuti.

PRECAUZIONI

- Non usare Spray Mask Salus Thermae se si è ipersensibili/allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Gravidanza e allattamento: non vi sono dati relativi all'impiego del prodotto durante la gravidanza o l'allattamento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, per evitare incidenti con le piccole parti.

INDICAZIONE

Da usare per l'igienizzazione dei tessuti di mascherine ad uso personale.

BENEFICI:

- Spray Mask Salus Thermae protegge dai batteri e dai virus.
- Spray Mask Salus Thermae resiste sulle superfici finché non viene deterso.
- Spray Mask Salus Thermae rinnova e igienizza i tessuti.

ISTRUZIONI PER L'USO

MODALITÀ D'USO

Per evitare contaminazioni, lavare accuratamente le mani prima dell'uso. Spruzzare con parsimonia il prodotto sull'intera superficie sia interna che esterna della mascherina dopo il suo utilizzo giornaliero. Spruzzare il prodotto alla sera ed indossare la mascherina il giorno dopo.

ATTENZIONE

Contiene perossido di idrogeno. Non indossare la mascherina fino a completa asciugatura del prodotto, evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota verso i componenti.

COME FUNZIONA

Alla base di Spray Mask Salus Thermae ci sono:

Perossido di Idrogeno: per igienizzare la mascherina.

Mentolo: per donare freschezza.

L'esclusivo Argento colloidale Synthag che crea una barriera protettiva che intrappola e inibisce gli agenti patogeni.

INTRAPPOLA INATTIVA PROTEGGE

LA CONFEZIONE SPRAY GOLA SALUS THERMAE CONTIENE

- Spray Mask composto da flacone e cappuccio protettivo.
- Spray Mask Salus Thermae contiene: Aqua (Deionized Water), Aqua (Thermal Water), Butylene Glycol, Polysorbate 20, Citric Acid, Menthol, Hydrogen Peroxide, Colloidal Silver.
- Istruzioni per l'uso (bugiardino).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

- Scadenza: 2 anni dopo l'apertura del flacone.
- Conservare a temperatura pari o inferiore a 25°C.

PRODOTTO DA:

SALUS CUTIS ITALIA SRL Via Cardano 32 - 43036 Fidenza (PR)