

SPRAY PROTEZIONE NASO

SPRAY NASO

Dispositivo medico a base di Argento
Colloidale SynthAg e Acqua salsobromoiodica



SALUS
THERMAE
MEDICAL DEVICE

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo Spray Naso Salus Thermae crea una barriera protettiva rivestendo la mucosa del naso. La barriera intrappola i batteri e i virus del raffreddore, li blocca e impedisce loro di diffondersi e moltiplicarsi. La sinergia dell'argento colloidale SynthAg ed dell'acqua salsobromoiodica svolge inoltre un'azione decongestionante e lenitiva sul tessuto irritato o infiammato.

DESTINAZIONE D'USO

Tratta e allevia il raffreddore, rigenera e protegge la mucosa nasale.

PRECAUZIONI

- Non usare Spray Naso Salus Thermae se si è ipersensibili/allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Gravidanza e allattamento: non vi sono dati relativi all'impiego del prodotto durante la gravidanza o l'allattamento.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, per evitare incidenti con le piccole parti.
- Consultare un medico se si ha la febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un normale raffreddore; potrebbero essere dovuti ad altre cause.
- Per evitare la diffusione di malattie, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona, previa accurata igiene delle mani.

INDICAZIONE

Da usare in caso di esposizione a batteri, virus del raffreddore o alla comparsa dei primi sintomi del raffreddore e del mal di gola. Spray Naso Salus Thermae è adatto per adulti e bambini sopra i 4 anni.

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono noti effetti collaterali.

Se dovessero verificarsi effetti indesiderati durante l'uso di Spray Naso Salus Thermae, consultare un medico.

BENEFICI CLINICI:

- Spray Naso Salus Thermae protegge dai batteri e dai virus del raffreddore.
- Spray Naso Salus Thermae riduce la durata del raffreddore se usato nella fase iniziale dell'infezione.
- Spray Naso Salus Thermae allevia i sintomi del raffreddore.

ISTRUZIONI PER L'USO

QUANDO USARE

Iniziare ad utilizzare Spray Naso Salus Thermae appena possibile dopo la comparsa dei primi sintomi del raffreddore o dopo la possibile esposizione ai virus e batteri. Continuare a usare Spray Naso Salus Thermae fino a quando i sintomi non saranno alleviati.

COME USARE:

1

Lavarsi le mani, posizionare l'erogatore nella narice.



2

Spruzzare una o 2 volte in ogni narice attraverso l'apposito erogatore per 2-3 volte al giorno al giorno per tutto il tempo in cui si è esposti ai patogeni.



COME FUNZIONA

Alla base di Spray Naso Salus Thermae c'è l'esclusivo Argento colloidale Synthag, che crea una barriera efficace contro agenti patogeni agendo in tre modi:

Intrappola: il Synthag crea una barriera transitoria osmoticamente attiva che intrappola i patogeni.

Inibisce: il Synthag ostacola la capacità dei patogeni di legarsi, impedendogli di infettare le cellule.

Protegge: la barriera creata da Spray Naso Salus Thermae protegge la mucosa del naso.

INTRAPPOLA INATTIVA PROTEGGE

LA CONFEZIONE SPRAY GOLA SALUS THERMAE CONTIENE

- Spray nasale composto da flacone e cappuccio protettivo.
- Spray Naso Salus Thermae contiene: Aqua (Deionized Water), Aqua (Thermal Water), Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Citric Acid, Menthol, Colloidal Silver.
- Istruzioni per l'uso (bugiardino).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

- Scadenza: 2 anni dopo l'apertura del flacone.
- Conservare a temperatura pari o inferiore a 25°C.

PRODOTTO DA:

SALUS CUTIS ITALIA SRL Via Cardano 32 - 43036 Fidenza (PR)